

# CKC

Integrated control panel

**SKYLUX®** 山田医療照明株式会社

<https://www.skylux.co.jp>

本社／関東支店  
〒101-0065  
東京都千代田区西神田 2-3-16  
TEL.03-5212-6021 / FAX.03-5212-6022

大阪支店  
〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町 27-15  
TEL.06-6192-7570 / FAX.06-6192-7571

仙台支店  
〒982-0014  
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4  
TEL.02 2-304-3631 / FAX.022-304-3633

広島支店  
〒732-0811  
広島県広島市南区段原 4-21-6  
TEL.082-510-2015 / FAX.082-510-2016

北関東支店  
〒330-0854  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1  
TEL.048-658-0077 / FAX.048-658-0078

福岡支店  
〒816-0932  
福岡県大野城市瓦田 5-3-29  
TEL.092-588-3322 / FAX.092-588-3323

名古屋支店  
〒462-0804  
愛知県名古屋市北区上飯田南町 3-5-1  
TEL.052-914-7086 / FAX.052-914-7216

埼玉工場  
〒340-0834  
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1  
TEL.048-994-2621 / FAX.048-994-2622

製造販売業許可番号: 11B2X10036

販売名: イクシムシリーズ IXM series / 品目番号: 11B2X10036000001



すべての医療空間に、最適な光環境を。

## 最適な光空間を自在にコントロール

最適な照明環境づくりに重要なベース照明と無影灯の特性を最大限に発揮させるコントロールパネル IXM CKC。ワンタッチでシーンに応じた照明設定（色温度・照度）へ自在にコントロールできます。



## 複数の無影灯の照度を同時に調整可能

複数の無影灯を「リンクモード」で統括制御。リンクモードにすることで複数の無影灯の照度を一齐に調整することが可能です。


※コントロールパネルからの調光操作で連動します。  
無影灯からの調光操作では連動しません。



## 統括制御することで、医療空間に最適な照明環境をつくりだします


無影灯とベース照明は、コントロールパネルの操作を通じて連動して変化させることが可能です。そのときの状況に応じて色温度・照度をワンタッチで瞬時に変化させて、最適な照明環境をつくりだすことができます。

スタッフの準備・片付け

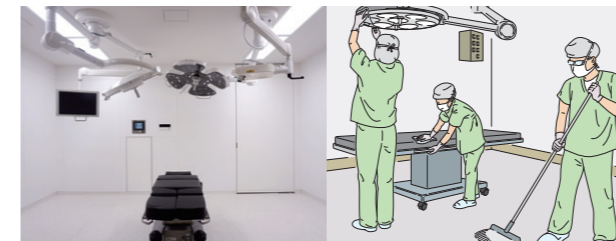


ベース照明を高めの色温度（昼光色：6000K）に設定します。

患者様の入退室

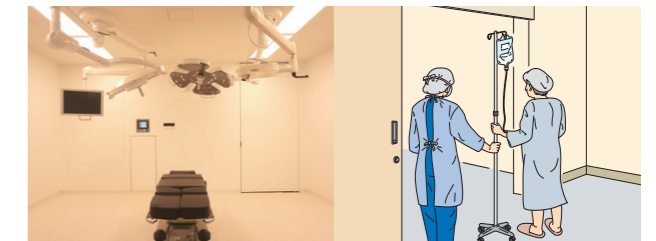

ベース照明は穏やかな色温度（暖色：3000K）。患者様の入退室の時の緊張感を緩和します。

手術中

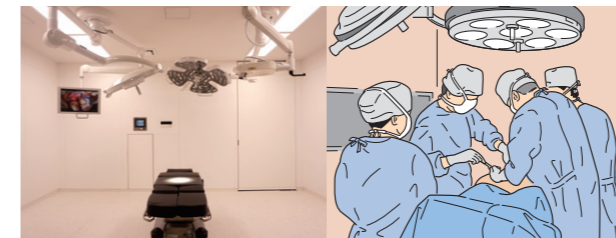

ベース照明と無影灯の光を同じ色温度（白色：4250K）に揃えることで、執刀医やスタッフの目の疲労を軽減。

内視鏡



ベース照明の照度を落とし、無影灯にある暗室灯を点灯。

## 仕様

項目	CKC
本体寸法	W218×H173×D60mm (タッチパネルPCのみ)
入力定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	12VA
本体重量	1.2kg (タッチパネルPCのみ)
表示サイズ	7.5型
タッチパネル方式	アナログ抵抗被膜方式
タッチパネル寿命	100万回以上
バックライト寿命	50,000時間以上 (バックライト輝度50%迄の時間)
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:30~70%RH (結露無き屋内環境であること) 気圧:800~1,060hPa
環境対策	放射エミッション CISPR11 グループ1 準拠
	雑音端子電圧 CISPR11 グループ1 準拠
	高調波入力電流規制 IEC61000-3-2 準拠
	電圧変動及びフリッカ IEC61000-3-3 準拠
	イミュニティ IEC61000-4-2 (レベル3) 準拠 IEC61000-4-3 (レベル2) 準拠 IEC61000-4-4 (レベル3) 準拠 IEC61000-4-5 (レベル3) 準拠 IEC61000-4-6 (レベル2) 準拠 IEC61000-4-8 (レベル2) 準拠 IEC61000-4-11 準拠

※本機 (CKC) はベース照明 (CK) のみ適応接続可能です。※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。  
※ステン化粧パネルサイズは別途調整となります。